

Peptide Technology for Hair



DR.CYJ
HAIR FILLER

CE
2265



● DR. CYJ HAIR FILLER



Özel Peptit Kompleksi

Kullanım Amacı

DR. CYJ Saç Dolgusu, kimyasal, fiziksel ve travmatik etkiler sonucu oluşan deri altı doku hasarlarının tedavisinde, hasarlı saç derisinin dermis tabakasına enjekte edilerek uygulanır.

- Saç dökülmesini durdurur
- Mevcut zayıf saçları güçlendirir
- Yeni saç oluşumunu teşvik eder
- Genel saçlı deri sağlığını iyileştirmeyi amaçlar


Bileşim

Fosfat Tamponlu Su (PBS) ----- 1ml'e kadar
Sodium Hyaluronate -----7 mg/ml
Decapeptide-28, Oligopeptide-71, Octapeptide-2, Decapeptide-18,
Oligopeptide-54, Octapeptide-11, Decapeptide-10

1 x 1ml önceden doldurulmuş şırınga

Uygulama

- 1.Enjeksiyon yapılacak alan belirlenir.
- 2.Lokal anestezi krem uygulanır, 30 dakika sonra temizlenir ve alkolü pamukla sterilize edilir.
- 3.DR.CYJ Hair Filler ince uçlu bir iğne (30~32G) ile uygulanmalıdır. İğne saç derisi yüzeyine yaklaşık 30° açıyla yerleştirilmelidir. Yüzeysel veya orta dermise enjekte edilmelidir.
- 4.Enjeksiyon Tekniği: Point injection + Serial puncture
 - Enjeksiyon noktası: 0.2~0.3cm/ 1.0cm
 - Nokta başına: 0.02~0.05ml ürün

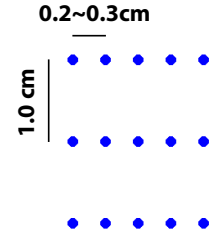


***** Klinik Protokol: Etkin sonuçlar için 2 haftada bir uygulanan toplam 4 seanslık tedavi protokolü önerilir.**



Önemli Kontrendikasyonlar

- Ürün bileşenlerine karşı belirlenmiş bireysel aşırı duyarlılığı olan hastalara veya enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon veya cilt hastalığı bulunanlara uygulanmamalıdır.
- Damar içi enjeksiyon yapılmamalıdır.
- DR.CYJ Hair Filler, saçlı deride inflamasyon/tahriş bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.
- Herhangi bir bileşene alerjisi olan hastalar, cilt lezyonları, enfeksiyonlar, streptokok enfeksiyon komplikasyonu olanlar, immünosupresan kullananlar, kortikal tedavi görenler veya otoimmün hastalık öyküsü olanlar ürünü kullanmamalıdır.


“Dr. CYJ Hair Filler, saç ekimi sonrasında destekleyici bir tedavi olarak oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Ancak saç ekimi işlemi sonrasında saçlı deride oluşan hassasiyet ve iyileşme süreci nedeniyle uygulamanın en az 2 hafta sonra yapılması önerilir.”

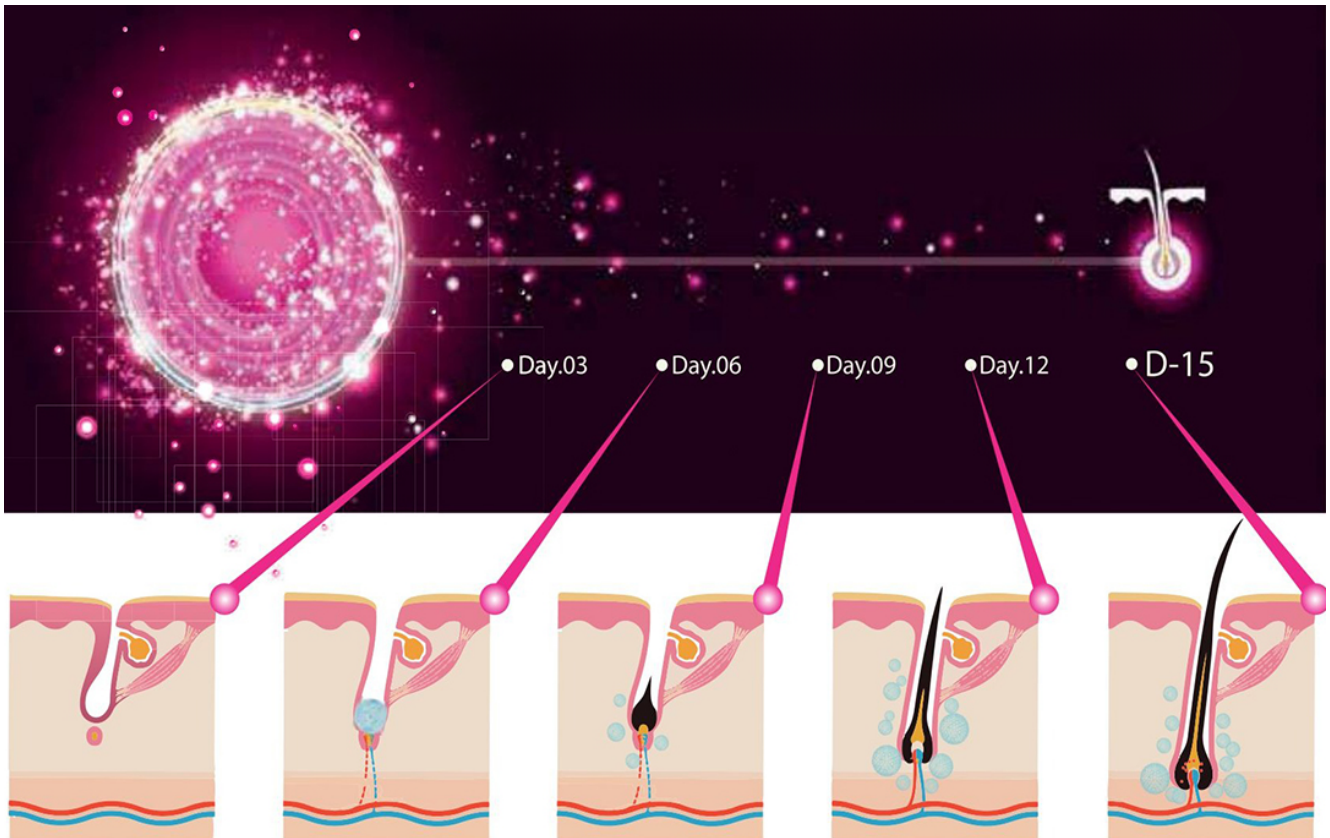

Cilt Matrisine Entegrasyon

DR.CYJ Hair Filler, saç derisine kolayca yayılır ve çevre dokuyla bütünleşir.

İmplantasyon testi DR.CYJ Saç Dolgusu Enjeksiyonu (In-vivo test)

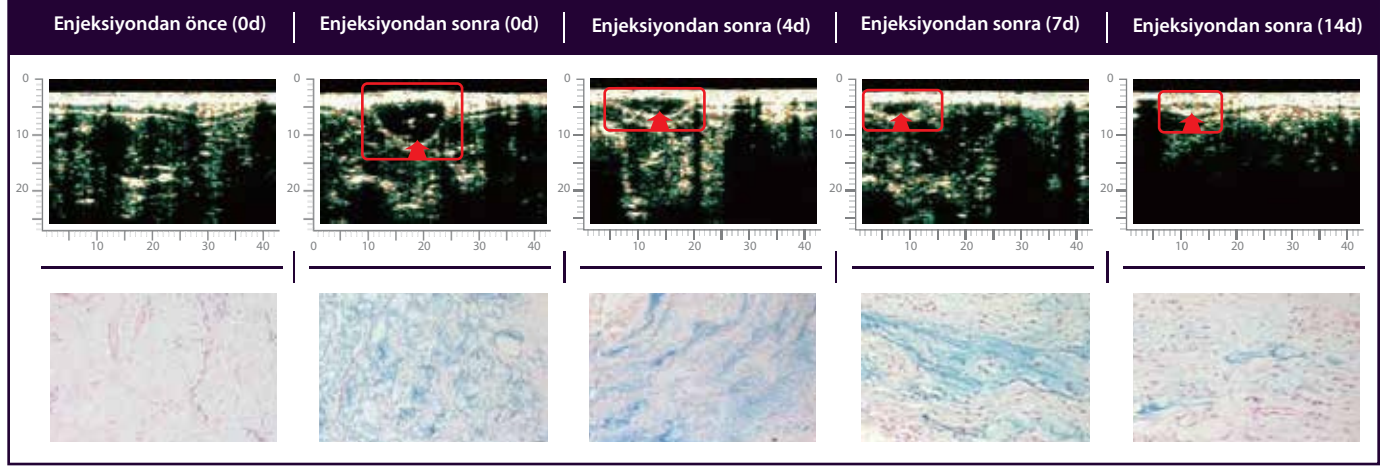


- **Ultrason görüntüsü:** Hyaluronik asit boş bir tortudur
- **Alcian mavisi boyama:** Hyaluronik asit mavi bir tortudur

DR.CYJ
HAIR FILLER


DR.CYJ Saç Dolgusunun Hasarlı Saç Derisindeki İyileştirme Etkisi

Yaşlı bir kişiden alınan kafa derisi dokusu (Kafa derisi biyopsisi)

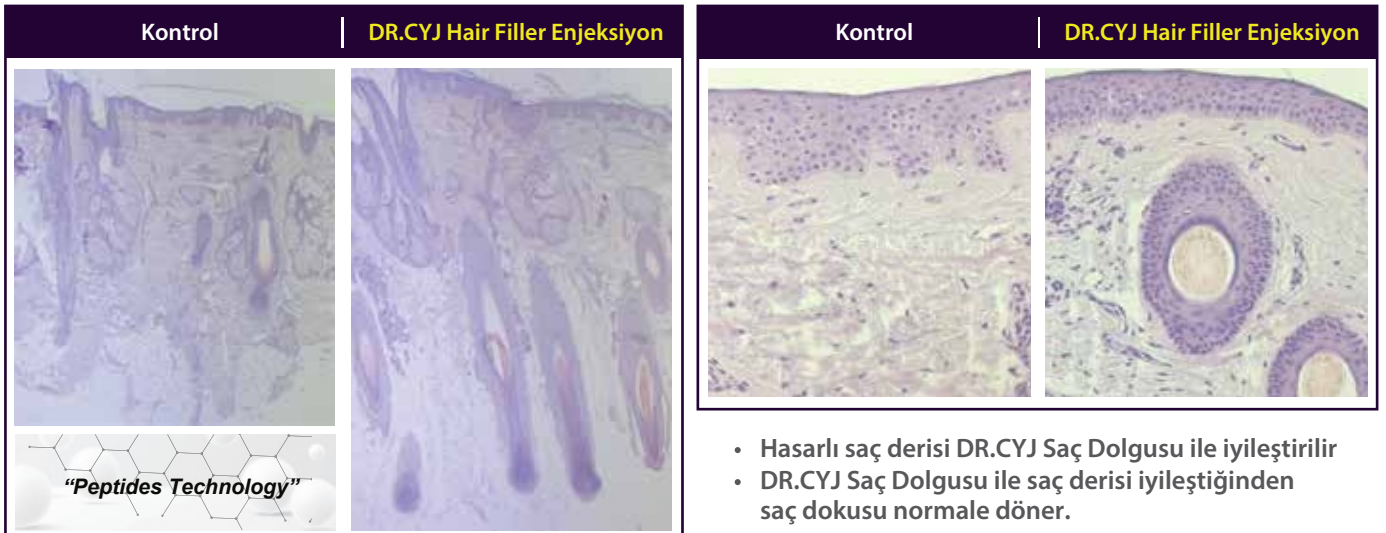

İnsan Klinik Çalışması Öncesi ve Sonrası

Özet

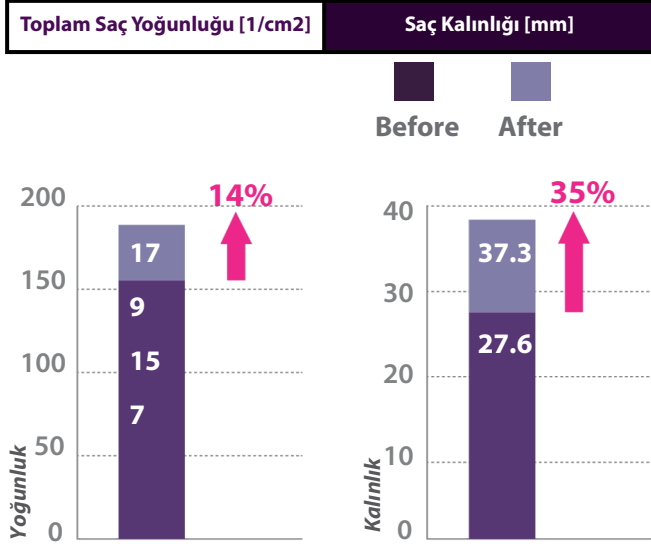

Saç Yoğunluğu

DR.CYJ Saç Dolgusu, başlangıç seviyesine (D0) kıyasla saç yoğunluğunu önemli ölçüde iyileştirdi.

- Bu çalışmanın sonuçlarına göre, bu dönemde saç yoğunluğu başlangıç seviyesine kıyasla yaklaşık %14 oranında iyileşti.


Saç Kalınlığı

DR.CYJ Saç Dolgusu, başlangıç seviyesine (D0) kıyasla saç kalınlığını önemli ölçüde (%35) iyileştirdi

Bu çalışmada DR.CYJ Saç Dolgusu'nun 8 haftalık lokal tedavi sonrasında **erkek tipi saç dökülmesi**, **kadın tipi saç dökülmesi** ve **Alopesi Areata**'nın iyileştirilmesinde etkili olduğu bulunmuştur.

DURUM# 01

8 hafta boyunca her 2 haftada bir 1 seans (4 seans)

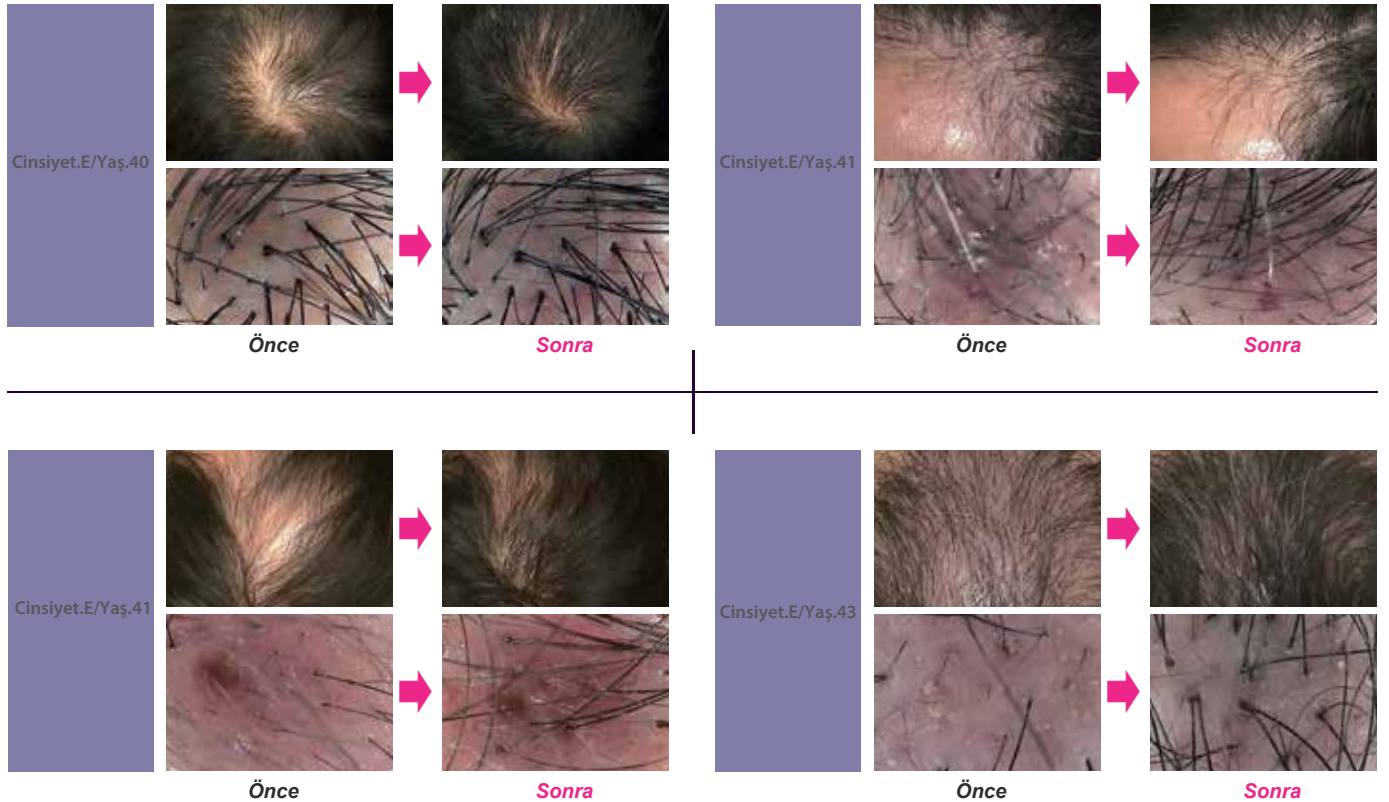

DURUM# 02

8 hafta boyunca her 2 haftada bir 1 seans (4 seans)



DURUM# 03



DURUM# 04

4 hafta boyunca her 2 haftada bir 1 seans (2 seans) 8 hafta boyunca her 2 haftada bir 1 seans (4 seans)





**REGECCORP TIBBİ ÜRÜNLER SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.**

Adres: Karacaoğlan Mah. 6167 Sok. A Blok No: 30/D Bornova,
İzmir/Türkiye

E-Posta: info@regeccorp.com

Tel. No: +90 232 472 34 43
Web Sitesi: www.regeccorp.com


İSTANBUL AVRUPA
+90 538 645 21 84

İSTANBUL ANADOLU
+90 538 645 26 50

EGE BÖLGESİ
+90 538 645 26 60

**DOĞU VE GÜNEY DOĞU
ANADOLU BÖLGELERİ**
+90 538 645 26 43

TÜM BÖLGELER
+90 537 727 51 94

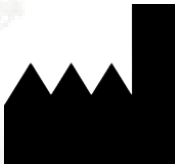

CAREGEN CO., LTD.

46-38, LS-ro 91beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do,
14119 SOUTH KOREA
www.caregen.com